

Λεωφορεία και τρένα

ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

**Δεν επιτρέπεται η βασική μονάδα υγρού (FREELOX),
επιτρέπεται μόνο η φορητή μονάδα
Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες**

- Είναι απαραίτητη η άδεια από την εταιρεία μεταφοράς

ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Επιτρέπεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες

- Είναι απαραίτητη η άδεια από την εταιρεία μεταφοράς

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Συνήθως επιτρέπεται

- Είναι απαραίτητη η άδεια από την εταιρεία μεταφοράς



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Μην έχετε ποτέ φιάλη ή φορητή μονάδα υγρού στο διάδρομο του λεωφορείου ή τρένου.
- Να ταξιδεύετε μόνο στα «διαμερίσματα» μη καπνίζοντων.
- Μην επιτρέπετε σε καμία περίπτωση το κάπνισμα ή την παρουσία γυμνής φλόγας στο διαμέρισμα των επιβατών παρουσία οξυγόνου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΕΠΕΙ:

- Πριν τη φόρτωση, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστή.
- Να ελέγχετε τη φιάλη για τυχόν διαρροές πριν τη φόρτωση.
- Να είστε προσεκτικοί με το χειρισμό των φιαλών κατά τη διάρκεια της φόρτωσης.
- Να ασφαλίσετε/ δένετε κάθε φιάλη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
- Να κρατάτε τις φιάλες μακριά από οποιαδήποτε εστία ανάφλεξης ή θερμότητας.
- Να μεταφέρετε μόνο την απαραίτητη για το ταξίδι σας ποσότητα οξυγόνου.
- Να φορτώνετε τις φιάλες στο όχημα λίγο πριν την αναχώρηση.
- Να προσφιλιάσετε τη βαλβίδα της φιάλης και τον ρυθμιστή πίεσης-εκτονωτή κατά τη διάρκεια όλου του ταξιδιού με το κατάλληλο καπάκι φιάλης.
- Να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό χωρίς υγραντήρα.
- Εάν παρατηρηθούν διαρροές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σταματήστε το όχημα και μετακινήστε τον εξοπλισμό σε ανοιχτό χώρο.
- Να κρατάτε τη φορητή μονάδα οξυγόνου σε όρθια θέση.
- Εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν επιπλέον εύφλεκτα υλικά κοντά στον εξοπλισμό οξυγόνου, π.χ. ότι δεν υπάρχει κοντά δεξαμενή βενζίνης.
- Αφαιρέστε όλες τις φιάλες οξυγόνου ή τα δοχεία οξυγόνου από το αυτοκίνητο, όταν φτάσετε στον τελικό προορισμό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην μεταφέρετε ποτέ τη φιάλη κρατώντας τη από τη βαλβίδα ή το ρυθμιστή πίεσης.
- Να μην έρχεστε σε επαφή με τα συστήματα οξυγόνου όταν τα χέρια ή τα γόνατα σας έχουν λάδι ή λίπος.
- Να μην αποθηκεύετε ποτέ τις φιάλες στο διάδρομο οχήματος μαζικών μέσων μεταφοράς.
- Να μη συνδέετε ή αποσυνδέετε οποιοδήποτε εξάρτημα μέσα στο λεωφορείο ή το τρένο.
- Να μην καπνίζετε ποτέ κατά τη διάρκεια χρήσης οξυγόνου.
- Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια χρήσης οξυγόνου.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

- Σε περίπτωση πυρκαγιάς εκκινώστε την περιοχή μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική.
- Ενημερώστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόλις φτάσουν για την ύπαρξη οξυγόνου μέσα στο αυτοκίνητο.

VitalAire Hellas

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΕΒΕ

Κατάστημα Αθηνών:

Αδριανείου 9, 115 25 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Τηλ. 210 6720 400, Φαξ 210 6720 444

Κατάστημα Θεσ/νίκης:

12ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Έδεσσας,

570 08 ΣΙΝΔΟΣ

Τηλ. 2310 723 800, Φαξ 2310 710 075

e-mail: vitalairehellas@airliquide.com




www.airliquide.gr
www.vitalaire.gr

VitalAire

Ταξίδι και Οξυγόνο

Οδηγός για Ασφαλές Ταξίδι

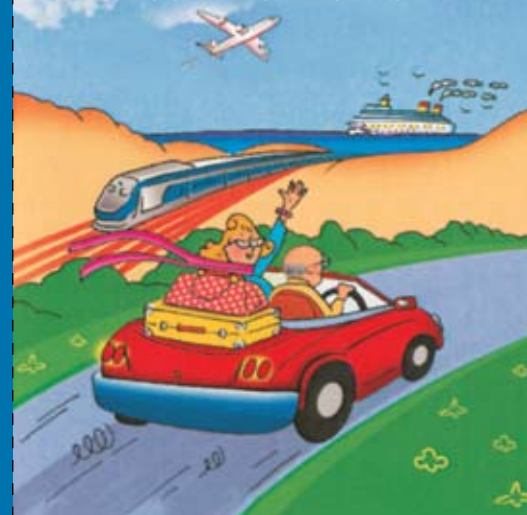

07/2008

ERGO PUBLICATIONS

www.airliquide.gr
www.vitalaire.gr



Τροχόσπιτα

ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Δε συστήνεται

Μπορεί να επιτραπεί μόνο κάτω από αυστηρά συγκεκριμένες συνθήκες

- Τουλάχιστον 2m απόσταση από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας
- Καμία γυμνή φλόγα (μπάρμπεκιου ή σύστημα μαγειρέματος) σε απόσταση 5m
- Συμφωνία με τη διεύθυνση της κατασκήνωσης

ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Μπορεί να επιτραπεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες

- Τουλάχιστον 2m απόσταση από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας
- Καμία γυμνή φλόγα (μπάρμπεκιου ή σύστημα μαγειρέματος) σε απόσταση 5m
- Συμφωνία με τη διεύθυνση της κατασκήνωσης

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Επιτρέπεται



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Οι συμπυκνωτές συστήνονται ως εναλλακτική λύση αντί των φιαλών ή των μονάδων υγρού (FREELOX).
- Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής φυσικός και / ή τεχνητός εξαερισμός και να μην παρεμποδίζεται (είσοδος φρέσκου αέρα και όχι ανακύκλωση του υπάρχοντος αέρα). Εξοπλισμός, ο οποίος βρίσκεται έξω θα πρέπει να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, π.χ. να βρίσκεται κάτω από ένα στέγαστρο ή με τη βοήθεια άλλων μέσων.
- Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ασφαλής απόσταση μέσα στο τροχόσπιτο, ο εξοπλισμός οξυγόνου θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να τοποθετείται έξω από το τροχόσπιτο.
- Ο εξοπλισμός ο οποίος είναι τοποθετημένος έξω θα πρέπει να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες κάτω από ένα στέγαστρο ή με άλλα μέσα.
- Να μη συνδέετε ή αποσυνδέετε εξαρτήματα μέσα στο τροχόσπιτο.

Κρουαζιερόπλοια, πλοία

ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Δε συστήνεται

- Τουλάχιστον 2m, μακριά από οποιαδήποτε εστία θερμότητας
- Απαιτείται έγκριση από την εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα, πριν από την έναρξη του ταξιδιού

ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Επιτρέπεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες

- Τουλάχιστον 2m, μακριά από οποιαδήποτε εστία θερμότητας
- Απαιτείται έγκριση από την εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα, πριν από την έναρξη του ταξιδιού

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Επιτρέπεται

- Τουλάχιστον 2m, μακριά από οποιαδήποτε εστία θερμότητας
- Απαιτείται έγκριση από την εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα, πριν από την έναρξη του ταξιδιού



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει πριν από την έναρξη του ταξιδιού να ειδοποιείται εγκαίρως η εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να δοθεί έγκριση χρήσης οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με κρουαζιερόπλοιο ή πλοίο.
- Οι συμπυκνωτές, συνιστώνται πλήρως για αυτό τον τύπο ταξιδιού.

Αυτοκίνητα

ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Επιτρέπεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες

- **Δεν επιτρέπεται** να χρησιμοποιείτε τη βασική μονάδα υγρού οξυγόνου (FREELOX) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με αυτοκίνητο
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τη φορητή μονάδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με αυτοκίνητο

ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Επιτρέπεται κάτω από ορισμένες συνθήκες

- Επιτρεπόμενη ποσότητα: 3 φιάλες (χωρητικότητας 5 λίτρα το πολύ η κάθε μια)

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Επιτρέπεται

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

- Σβήστε τη μηχανή και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές
- Βγείτε έξω από το όχημα αμέσως και εκκενώστε την περιοχή
- Καλέστε την πυροσβεστική και ενημερώστε τους αμέσως για τον εξοπλισμό οξυγόνου που βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Να διατηρείτε επαρκή εξοπλισμό στο όχημα (είσοδος φρέσκου αέρα, όχι ανακυκλωμένος αέρας).
- Να αφαιρείτε όλο τον εξοπλισμό του οξυγόνου από το αυτοκίνητο όταν φτάνετε στον προορισμό σας.
- Μην σταθμεύετε το όχημα κάτω από τον ήλιο όταν βρίσκεται μέσα σε αυτό οξυγόνο.
- Μην αφήνετε τις φιάλες οξυγόνου μέσα στο αυτοκίνητο όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη φορητή μονάδα υγρού οξυγόνου κατά τη διάρκεια πλήρωσης του οχήματος με καύσιμα.
- Να μην αφήνετε οξυγόνο χωρίς επίτηρηση μέσα στο όχημα.
- Να μη συνδέετε ή αποσυνδέετε οποιοδήποτε εξάρτημα μέσα στο όχημα.

Αεροπλάνα

ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Δεν επιτρέπεται

ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Τις περισσότερες φορές δεν επιτρέπεται

- Ύστερα από συνεννόηση, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να σας δώσει φιάλες συγκεκριμένες για χρήση κατά τη διάρκεια της πτήσης

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Συνήθως επιτρέπεται

- Με την προϋπόθεση έγκρισης από την αεροπορική εταιρεία



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Εξασφαλίστε με τη βοήθεια του γιατρού σας, ότι μπορείτε να ταξιδέψετε με αεροπλάνο και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε το οξυγόνο κατά τη διάρκεια της πτήσης.
- Ελέγξτε με το γιατρό σας εάν μπορείτε να ταξιδέψετε μόνος/ μόνη σας (συνίσταται να ταξιδεύετε με συνοδό).
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της κατ' οίκον θεραπείας για την εξυπηρέτησή σας μέχρι την περιοχή του check-in και μετά την άφιξη σας.
- Να προσέρχεστε νωρίς στο αεροδρόμιο έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί καλή συνεργασία μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του προμηθευτή της κατ' οίκον θεραπείας.
- Να αποφεύγετε και να διατηρείτε ασφαλείς αποστάσεις από καθορισμένες περιοχές καπνίζοντων.